



# Vitalograph pochp-6

Diagnostyka w kierunku POCHP

Instrukcja szybkiego uruchamiania

## Przygotowanie urządzenia

- 1 Należy włączyć urządzenie.



- 2 Należy ustawić wiek badanego.

Nacisnąć lub aby ustawić wiek.



Nacisnąć , aby zapisać ustawienia.

- 3 Należy ustawić wzrost badanego.

Nacisnąć lub aby ustawić wzrost.



Nacisnąć , aby zapisać ustawienia.

- 4 Należy ustawić płeć badanego.

Nacisnąć lub aby ustawić płeć.



Nacisnąć , aby zapisać ustawienia.

## Wykonywanie badania

- 1 Należy założyć jednorazowy ustnik SafeTway.




- 2 Następnie zademonstrować badanemu jak wykonać badanie.

- ▼ Proszę wziąć pełny wdech i zatrzymać oddech ...
- ▼ Proszę włożyć ustnik do ust i lekko nagryźć
- ▼ Następnie proszę dmuchać tak mocno jak to możliwe przez 6 sekund



- 3 Należy powtórzyć badanie jeszcze dwa razy.

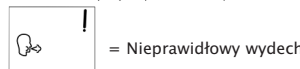

= Nieprawidłowy wydech

- 4 Należy nacisnąć aby pokazać najlepszy wynik

## Wyniki testu

### Prawidłowy

Strzałki zawsze pokazują najlepszy wynik ...



### Negatywny:

- ▼ Spirometria niewymagana
- ▼ Klasyfikacja POCHP kolor zielony

### Podejrzanie POCHP

Strzałki zawsze pokazują najlepszy wynik ...



### Pozytywny:

- ▼ Wskazana spirometria
- ▼ Klasyfikacja POCHP I do IV

### Podejrzanie restrykcji

Strzałki zawsze pokazują najlepszy wynik ...



### Wskaźnik obturacji niski:

- ▼ Wskazana spirometria
- ▼ Prawdopodobieństwo POCHP niewielkie


## Przeglądanie parametrów

- 1 Wyświetlacz pokazuje FEV1 i % wartości należnej.

Pokazuje wyniki dla każdego wydechu aż do wciśnięcia ...



- 2 Należy nacisnąć , aby wyświetlić stosunek FEV6, FEV1/FEV6, % wartości należnej i szacunkowy wiek płuc

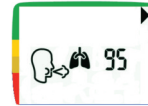

- 3 Przytrzymać przez 3 s, aby wyłączyć.

### Czyszczenie i dezynfekcja

Powierzchnie zewnętrzne powinny być czyszczone raz w tygodniu lub częściej, jeśli zajdzie potrzeba. Zaleca się stosowanie jednorazowej ściereczki dezynfekującej i zwracanie szczególnej uwagi na okolice ustnika.

[www.vitalograph.co.uk](http://www.vitalograph.co.uk)

FEV1 % wartości należnej	Wskaźnik obturacji	Klasyfikacja POCHP	Stosunek FEV1/FEV6 oraz FEV1 % wartości należnej
≥ 80 %	0	Prawidłowy	FEV1/FEV6 ≥ 0.7
< 80 %	1	Stopień I	FEV1/FEV6 < 0.70 & FEV1 ≥ 80 % wartości należnej.
< 50 %	2	Stopień II	FEV1/FEV6 < 0.70 & FEV1 < 80 % wartości należnej.
< 30 %	3	Stopień III	FEV1/FEV6 < 0.70 & FEV1 < 50 % wartości należnej.
		Stopień IV	FEV1/FEV6 < 0.70 & FEV1 < 30 % wartości należnej.